

How to Attach Osto-EZ-Vent[®]



Forberedelse: Inden montering af OEVentilen[®]
Åben ventilen. Hvis din stomipose har stofbetræk, skal du klippe et lille hul i stoffet øverst i stomiposens på forside, da ventilen skal monteres på selve posens inderfolie. (Fastgør ikke ventilen[®] oven på stomiposens kulfilter.)



1) 1) Fugt et stykke vat eller lign. med alm. husholdningssprit og afrens inderfolien. Lad det tørre.



2) Fjern dækpapiret* fra OEVentilens 'klæbeflade. RØR IKKE VED KLÆBELADEN.



3) Placer OEV[®] vandret på det afrensede område. Tryk den runde OEVentilens[®] klæbeflade godt fast hele vejen rundt som vist på billedet. Læg posen til side i 1 døgn, så ventilens klæber får god kontakt til stomiposens folie



4) 2-dels pose: Kræng herefter den side af posen, hvor OEVentilen[®] er fastgjort, ned og ud, gennem åbningen/koblingsringen på 2 1-dels pose: ventilen krænges ned og ud gennem hullet i posens klæbeflade.



5) Med den smalle ende af en saks, stikkes der gennem hullet i OEVentilinen[®]. Drej sakseklingen frem og tilbage for at fjerne overskydende posemateriale. Hullet skal svare til hele hullet i ventilen.



6) Når hullet er lavet, LUKKES ventilens prop og posen krænges tilbage til normal position som vist på billedet til venstre.



7) For at åbne OEVentilen[®], klem NED omkring OEVentilens[®] (vinger (låg)). Derved udløses lågets sammenkobling med ventilbunden og kan nu åbnes

8) Opbevaring: Ubrugte OEVentiler[®] opbevares ved stuetemp. Tørt og ikke for varmt

Se nærmere info og video om montering af ventilerne her: OstoEZVent.com.



Enterprises, Inc.

© 2024 Printed in U.S.A.
OEV[®] Manufactured in USA

Focuscare



Focuscare.dk

+45 49 26 13 99
info@focuscare.dk